




ASSUT EUROPE

SUTURE CHIRURGICHE




More than surgery

Test Rapido
Antigene COMBO
SARS-CoV-2/Influenza A+B

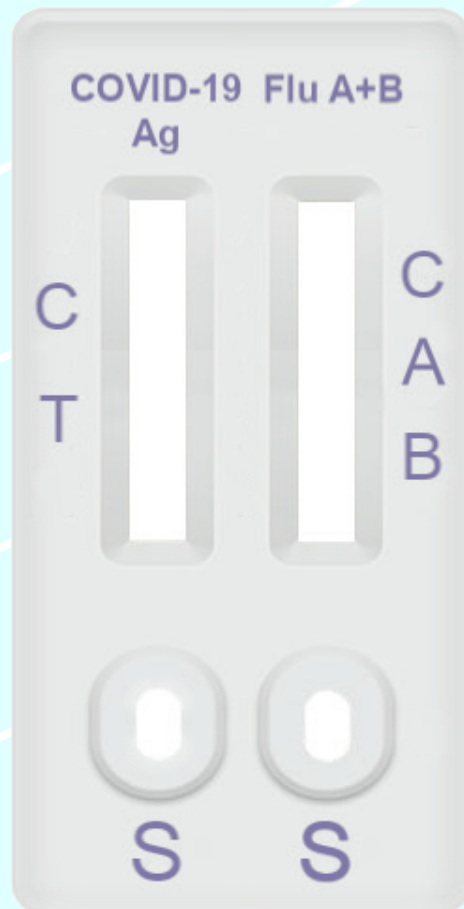


Il test rapido SARS-CoV-2/Influenza A + B Antigene Combo è un test immunologico a flusso laterale destinato alla rilevazione qualitativa di antigeni nucleoproteici virali SARS-CoV-2, influenza A e B in tamponi nasofaringei su soggetti con sospetto di infezione virale respiratoria coerente con COVID-19 da parte dell'operatore sanitario. I sintomi dell'infezione virale respiratoria dovuta da SARS-CoV-2 e quelli dell'influenza possono essere molto simili.

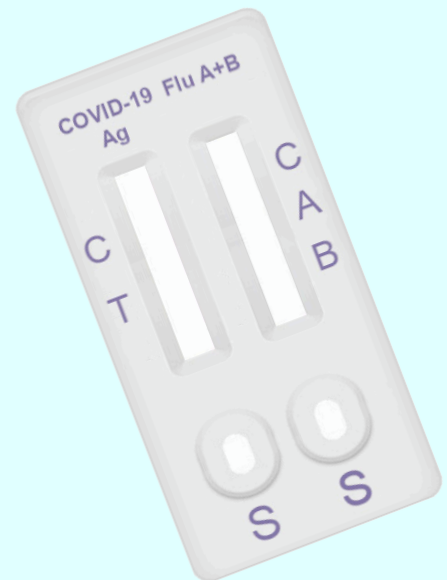

Contenuto del Kit



Preparazione del campione e Procedura del test

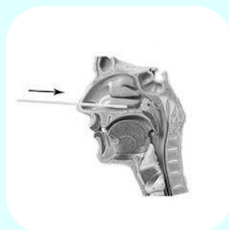

1. Inserire il tampone sterile attraverso la narice parallelamente al palato




2. Strofinare e ruotare il tampone, e lasciarlo in posizione per alcuni secondi per assorbire le secrezioni.




3. Rimuovere lentamente il tampone ruotandolo.




4. Aggiungere tutto il reagente di estrazione del campione in una provetta di estrazione, e poggiarla sulla base di lavoro.

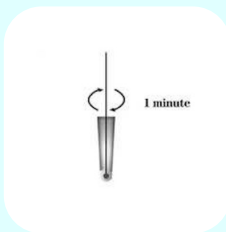

5. Inserire il tampone nella provetta. Ruotarlo almeno 5 volte facendo pressione sulla testa contro la base e la parete laterale della provetta, e lasciarlo così per 1 minuto.

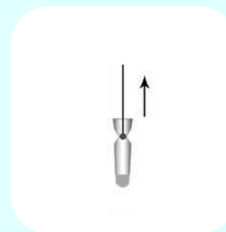


6. Pizzicare la provetta di estrazione e rimuovere il tampone.

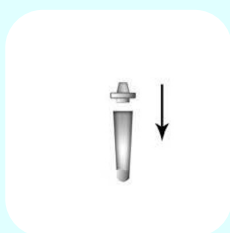

7. Inserire la punta del contagocce nella provetta.




8. Trasferire 3 gocce nel pozzetto del test a cassetta.

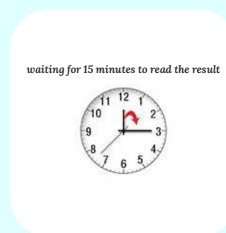


9. Interpretare i risultati in 15 minuti. Non interpretare i risultati dopo 20 minuti.

Interpretazione dei risultati

COVID-19 Ag

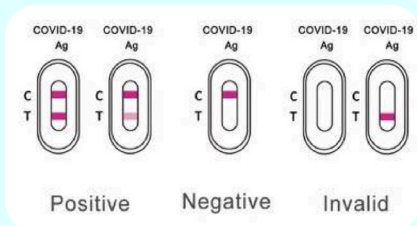

Flu A+B

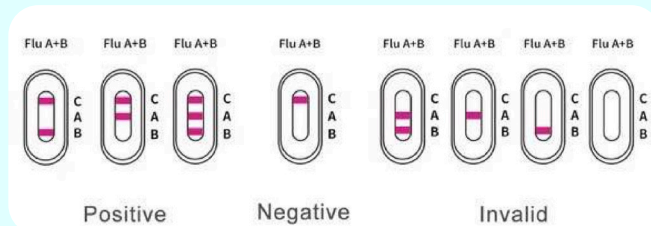

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

INF-COV/25

Test Rapido Antigene Combo
SARS-CoV-2/Influenza A+B

25



ASSUT EUROPE
SUTURE CHIRURGICHE



More than surgery

ITALIA

Stabilimento di Produzione

Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy
Tel. +39 0863 517956/515000
Fax +39 0863 570084/515209

Ufficio Legale

Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

FRANCE

86-114 Avenue Louis Roche
Batiment D Hall-3 92230
Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

ESPAÑA

Poligono Landaben
Calle C, nave 1y2 - 31012
Pamplona (Navarra)
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

GERMANY

Prager Strasse 34
04317 Leipzig

UK

Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222



USA

55 NE 5th Avenue, Suite 501
33432 - 4093 Boca Raton FL
United States

RUSSIAN FEDERATION

c/o Studio Marzona
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7
107031 Moscow
Tel/Fax +7 962 9862804

BRASIL

Rua Professor Alfredo Gomes, 14
CEP 22551-080
Botafogo Rio De Janeiro (RJ)
Tel.: 0055 21 22661943
Fax: 0055 21 22663539

ALGERIE

Zone D'Activité Dar El Beida
Lot n° 66, Bt 12
Alger

TUNISIE

Rue 7316 Villa n°5 - El Menzah 9B
1013 Tunis, Tunisie
Tel.: 00216 71875740
Fax: 00216 71880541

www.assuteurope.com

info@assuteurope.com



©2020 Assut Europe S.p.A. All rights reserved
CE 0373 - UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 14001:2015